

福祉用昇降式テーブル MATシリーズ 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- ◎ テーブルに腰を掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- ◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量45kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ 設置場所は段差や大きな凹凸がない所を選び、キャスターが4ヶ所同時に接地することを確認してからご使用してください。
- ◎ 移動するときは、キャスターのロックを解除してください。変形、破損の原因になります。
- ◎ 昇降するときは、必ず2人以上で行なって調整してください。変形、破損及び落下してけがをすることがあります。
- ◎ ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やけがをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

品質表示

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (Kg)	構造部材
MAT-1890 □□	1800	900	660~800	48.8	天板：28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造 エラストマエッジ〈赤ライン〉 脚部：φ42.7mmおよび60×30mmスチールパイプ ・メラミン焼付塗装 φ50mmロック付きナイロン双輪キャスター
MAT-1875 □□	1800	750		45.5	
MAT-1690 □□	1600	900		43.4	
MAT-1675 □□	1600	750		40.4	

※天板色 □□：NA=ナチュラル / WH=ホワイト ※高さは8段階 20mmピッチで調整できます。

お手入れ方法

- 通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
- ※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は絶対に使用しないでください。

※定期的にボルトの点検をし、ゆるみがある場合は締め直してください。

保証期間

＜日本国内において＞
目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な仕様による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から外観・表面仕上げ1年、機構部2年、構造体3年となっております。

■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記にお願いいたします。

TOKIO 藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南7-1-7 TEL：058 (247) 3311
東京：東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F TEL：03 (3552) 8824
大阪：大阪府中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F TEL：06 (6761) 5511
九州：福岡市博多区山王1-16-26 築栄センタービル205 TEL：092 (433) 5599




組立説明 組立前に部材を確認してください。

①天板：1枚
品番：MAT-1890T、MAT-1875T
MAT-1690T、MAT-1675T

②脚部：2本
品番：MAT-LEG

③六角穴付ボタンボルト
M8×25：4本

④スプリングワッシャー
M8用：4個

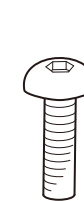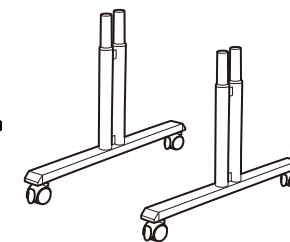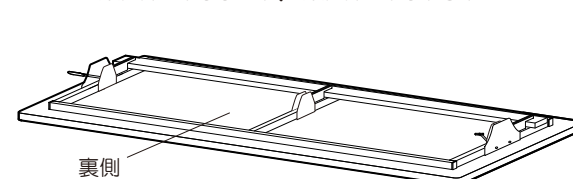

⑤六角レンチ：1個



注意 組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる可能性があります。重量がありますので、必ず2人以上で組立してください。


- 工具の扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- 組立の際は万が一に備え、軍手の着用をお願いいたします。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ボルトの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品および床面を傷つけないようご注意ください。

手順①

平らな台等に①天板の表面を下向きにして置いてください。本体の左右にある操作レバーのどちらか一方を矢印↓の方向に動かしてロックを解除し、確実にロックがかかるまで貫パイプを起こしてください。


手順②

貫パイプと②脚部の穴位置を合わせ、③六角穴付ボタンボルトに④スプリングワッシャーを差し込み、⑤六角レンチで仮締めしてください。組立した本体を起こし、キャスター4ヶ所が床面に接地していることを確認し、③六角穴付ボタンボルトを本締めしてください。

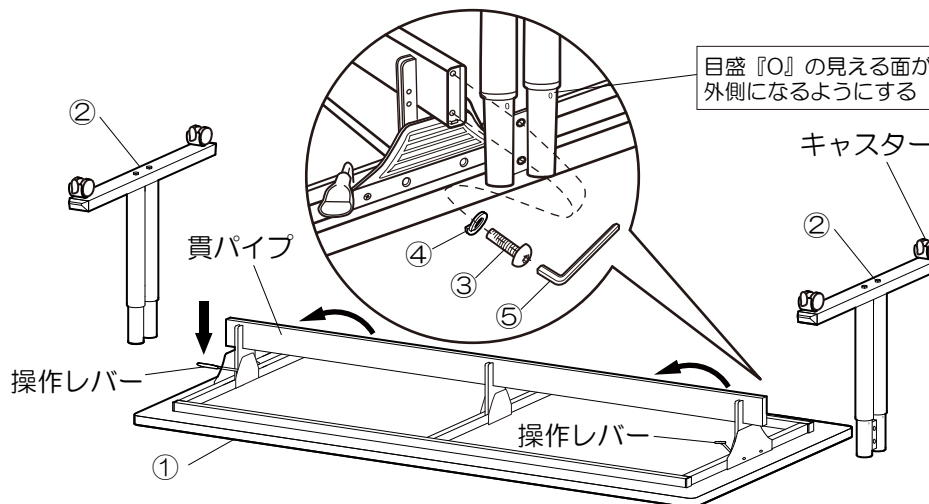

天板開閉方法


■ 操作レバーを矢印の方向に動かすとロックが解除し、天板を開閉することができます。確実にロックがかかるまでゆっくりと回転させてください。

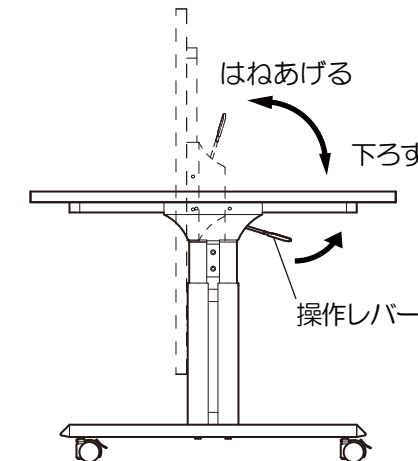


高さ調整機能

■ 天板の高さを660~800mmの範囲で調整できます。高さを調整するときは、2人以上で行ってください。

【天板を上げる時】

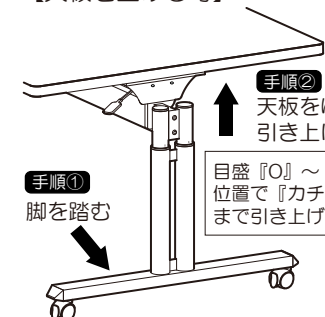

【天板を下げる時】

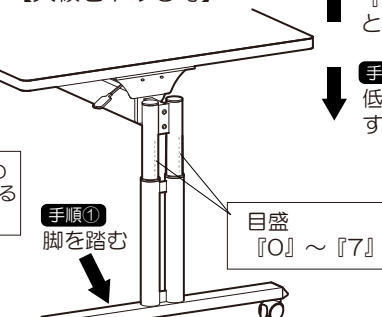

天板が傾いた状態で使用しないでください。左右の脚の目盛を必ず同じ高さの数字で合わせてください。天板に置いたものが落ちたり、脚部の故障の原因になります。

収納方法

■ 収納するときは天板をはねあげた状態で並行に重ねてください。(スタッキングピッチ：150mm)

